




MEDBAG

Рекомендации по использованию ампульницы **Ampule 40 Thermo**

Уважаемые коллеги! Благодарим за покупку и оказанное доверие! Надеемся, наша ампульница оправдывает все ваши ожидания и прослужит долго. Конструкция ампульницы отличается от аналогичных изделий других производителей – изменен способ крепления ампул, выделено место для хранения расходных материалов, пилочки и жгута. Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями по наполнению ампульницы – они помогут сделать использование ампульницы максимально комфортным!

Основные преимущества:

- Новый способ крепления ампул – этикетка открыта;
- Упругие стенки, термостатическое покрытие для защиты препаратов;
- Специальные карманы и крепления для шприцов, спиртовых салфеток, жгута, катетеров и других расходных материалов;
- Вместимость более 40 ампул.

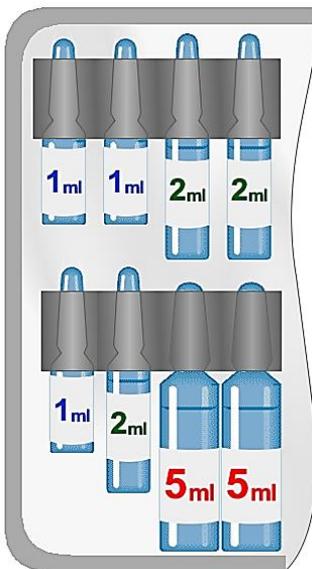

Отсек с креплениями для ампул 1, 2 и 5 мл.


Верхний ряд предназначен для хранения ампул 1 и 2 мл.
Нижний ряд – для ампул 1, 2 и 5 мл. Всего в отсеке можно разместить до 29 ампул.

Задняя стенка имеет специальную упругую прокладку, поддерживающую форму стенки и защищающую ампулы от повреждений. Серебристое покрытие создает эффект термостата, не допуская резких изменений температуры внутри ампульницы.

Мы предлагаем новый способ крепления ампул.

Крепите ампулы за колпачок **(1)** – так вы будете видеть название препаратов. «Заряжать» ампульницу препаратами и вынимать ампулы быстрее и проще.

При традиционном способе крепления **(2)** этикетки ампул закрыты, вынимать ампулы сложнее.

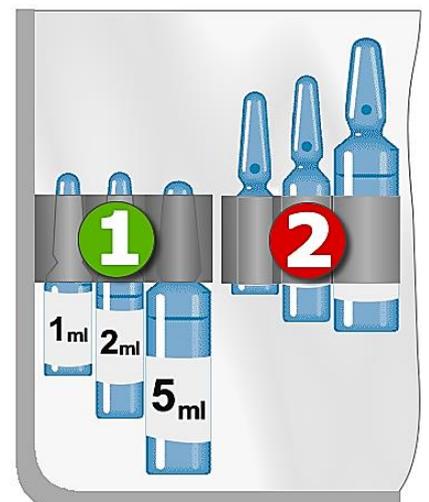

Обратите внимание!

Эластичные крепления ампул 1, 2 и 5 мл **новой** ампульницы плотно прижаты к стенке. Крепления растянутся и приобретут окончательную форму после двух-трех применений.



Перегородка


На **передней поверхности** перегородки расположено прозрачное окно. В него мы положили листок с рекомендациями по использованию ампульницы. На обратной стороне листа - краткий справочник дозировок препарата.

Если вам не пригодятся наши инструкция и справочник, храните в кармане собственные справочники (например препаратов) или небольшое количество спиртовых салфеток и катетеров- бабочек.

На **задней поверхности** перегородки расположены крепления для больших ампул и буфусов объемом от 10 мл. Можно разместить до 11 ампул или буфусов.

Два эластичных крепления справа имеют увеличенный объем для парного хранения ампул или емкостей большой и не стандартной формы. Так же удобно хранить буфусы попарно или по три, в зависимости от объема.

Рекомендуем фиксировать ампулы за верхнюю треть корпуса, чтобы крепление не закрывало этикетку.

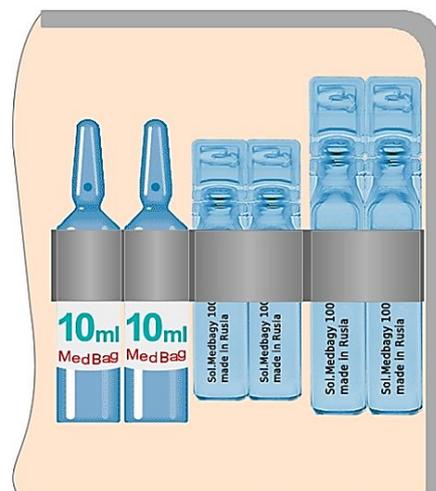

Объемный отсек с карманом



Крепления (1) рекомендуем для хранения шприцов, дополнительных ампул, буфусов. Крепления (2) зарезервировано для пилочки.

В сетчатом кармане (3) рекомендуем хранить плоские расходные материалы и объемные аксессуары – жгут, бинт, спиртовые салфетки, катетеры, ампулы и так далее. Сверху, если останется место, положите нестерильные перчатки. Если планируете использовать ампульницу на морозе или жаре – положите в карман термостатический гелевый пакет.

Задняя стенка имеет упругую прокладку и серебристый слой, защищающие препараты и аксессуары от повреждений и перепадов температуры.

Ручка для переноски

На задней части ампульницы расположена широкая ручка-стропа. Просуньте кисть под стропу и обхватите пальцами нижнюю часть ампульницы. Или используйте стропу как обычную ручку для переноски.

С помощью стропы можно зафиксировать ампульницу в автомобиле или прикрепить к основной упаковке экстренной помощи.



*С уважением к вашему труду,
команда разработчиков медицинских сумок MEDBAG*

Посетите официальный сайт Medbag.ru! Ознакомьтесь с полным каталогом наших изделий, получите техническую поддержку и сервисное обслуживание!

Продукцию MEDBAG можно приобрести на сайте партнера Shop.medcom.ru и в интернет-магазине Ozon.ru.



MEDBAG

